

# PAROWANIE URZĄDZENIA SAMARITAN TRAINER Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot dołączony do urządzenia Samaritan Trainer nie działa na podczerwień tak jak to ma miejsce w przypadku typowych urządzeń zdalnego sterowania. Urządzenie wraz z pilotem są ze sobą sparowane i są dostrajane do urządzeń przez rozpoznawanie ich identyfikatorów (ID), co pozwala na używanie dwóch urządzeń obok siebie. W związku z tym każdorazowe wyjęcie baterii a więc zerwanie tego połączenia powoduje konieczność ponownego sparowania urządzeń. Aby sparować urządzenia działaj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotuj kabel USB dedykowany dla Urządzenia Samaritan Trainer i podłącz go do komputera.
2. Uruchom program Universal Trainer Configurator. Jeśli nie masz programu możesz bezpłatnie pobrać go i zainstalować:  
[http://heartsinelive.s3.amazonaws.com/uploads/2015/06/TrainerConfigTool\\_setup.exe](http://heartsinelive.s3.amazonaws.com/uploads/2015/06/TrainerConfigTool_setup.exe)
3. Przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego Universal Trainer, należy włączyć funkcję *Dostrajania urządzeń sterujących*.
4. Odtłącz kabel USB i WŁĄCZ urządzenie używając ZIELONEGO wyłącznika głównego (ON/OFF). Diody wskaźnikowe zostaną podświetlone, co oznacza tryb dostrajania.
5. Przytrzymując CZERWONY WYŁĄCZNIK pilota zdejmij pokrywę baterii pilota a baterie wymień na nowe. Po wymianie baterii pilot zdalnego sterowania dostroi się do urządzenia. Po pomyślnym dostrojeniu urządzenie wyemituje 12 sygnałów dźwiękowych. Po pierwszych sygnałach dźwiękowych, należy przestać naciskać WYŁĄCZNIK i ponownie założyć osłonę baterii.
6. Kiedy urządzenie zakończy wydawanie sygnałów dźwiękowych, należy ponownie nacisnąć CZERWONY WYŁĄCZNIK na pilocie.  
· Urządzenie Samaritan Trainer WYŁĄCZY się.

Dla pewności włącz urządzenie zielonym przyciskiem i naciśnij dowolny przycisk scenariusza aby sprawdzić czy pilot działa prawidłowo.

*Jeśli masz problem lub potrzebujesz pomocy lub wskazówek zadzwoń –  
786 86 80 32 - chętnie pomożemy.*

**HS medical**

it's safe here.

**HS Medical**

Ul. Fabryczna 45  
43-100 Tychy

+48 32 325 69 38  
+48 786 868 032

NIP 6342498986

biuro@hsmedical.pl  
www.hsmedical.pl

